

Zapper

För effektiv avlägsning av vårtor, fibromer och skin tags.



Lätt och behändig att använda

Zapper, från Cti Medical Equipment, använder lågfrekvent växelström för att koagulera och avlägsna oönskad hudvävnad. Den är mycket effektiv för att avlägsna skin tags, fibromer, vårtor inkl i pedikyr, "sherry spots" och andra icke maligna hudutväxter. Den kan även användas för att avlägsna xanthelasma (under ögonen), vissa tatueringar (äldre, blekta) och pigmentering (ålderspigmentering; ytlig, upphöjd).

Behandlingen kan i vissa fall kännas, men ofta inget alls. Till exempel vårtor har ofta ingen nervförsörjning och känns normalt väldigt lite. Nålspetsen förs ca ½ mm över och runt omkring behandlingsområdet. När avståndet är riktigt kommer en gnista kontinuerligt hoppa mellan spets och hudvävnaden. Behandlingstid handlar om några få minuter per tillfälle.


Egenskaper och fördelar

- Säkrare och mer ekonomisk än traditionella behandlingsmetoder som frysning eller att skära.
- Ger inte upphov till ärr.
- Är säker och hygienisk och har inga bieffekter.
- Enkel att installera, få delar.
- Lätt i handen, enkel att handha.
- Kostnadseffektiv.

Generalagent:

DMK Sverige AB, Rååvägen 24, 252 70 RÅÅ, Tel 042-26 01 00, Fax 042-26 01 05
info@dmksverige.se • dmksverige.se

Behandlingsexempel

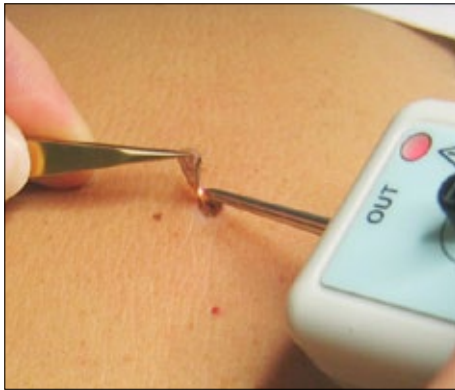

Större köttig fibrom: lyft upp med pincett och bränn vid roten.



Efter området desinficeras appliceras Betagel serum och Contra Derm crème.

Efter behandling

Desinficera med väteperoxid 3%. För efterbehandling och förbättrad läkning appliceras BetaGel Solution och Contra Derm. Som lättare alternativ kan Solar Damage Gel och Penzim Gel användas.

Vid större hudförändringar används BetaGel hemma under minst en vecka. För kontroll kommer kunden in efter en vecka. Rekommenderad behandlingsfrekvens är annars 1 gång per vecka tills skin taggen, vårtan har avlägsnats.

CTI ansvarar inte för skador på huden som en följd av fel inställning / användning av Zappern eller felaktig diagnos av användaren vid behandlingar.

Zappern får endast användas av kvalificerad personal.

För mer information, pris och betalningsvillkor kontakta Mette Rongved, DMK Sverige AB. Tfn. 042-26 01 00

DMK[®]

Med **resultatet** i fokus